

**Pour sélectionner le mode de réveil –**  
 Pour sélectionner le mode de réveil, faites glisser le « commutateur du mode Alarme » (8) vers la position souhaitée :-  
 a) «BUZZ» pour le son  
 b) «VIB» pour le vibreur de lit  
 c) «VIB/ BUZZ» pour aussi bien le son que le vibreur de lit  
**REMARQUE :** une fois le mode de réveil choisi, il sera appliqué aux deux alarmes.

**Modèles d'alarme –**  
 Lorsque l'alarme est activée, le modèle d'alarme de l'avertisseur sonore / de l'affichage clignotant n'est pas synchronisé avec le vibreur. Cela signifie que lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est ACTIVÉ, le vibreur est DÉACTIVÉ et lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est DÉACTIVÉ, le vibreur est ACTIVÉ.  
**ALARME 1 -** Lorsque l'alarme 1 est activée, 3 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.  
**ALARME 2 -** Lorsque l'alarme 2 est activée, 4 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

**Régler la durée de l'alarme –**  
 Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est de 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :  
 \* Appuyez sur le bouton **AL SET** (réglage de l'alarme) (5) puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'afficheur du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30'. Relâchez le bouton de réglage de l'alarme.  
 \* Appuyez sur le bouton **«SLOW»** (10) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).  
 \* Lorsque l'afficheur indique la durée d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

**Fonctionnement du rappel d'alarme –**  
 1) Lorsque l'alarme se déclenche le matin, vous pouvez appuyer sur le bouton **SNOOZE** (rappel d'alarme) (3) pour l'arrêter temporairement. L'alarme s'arrêtera pendant 9 minutes ou pendant la durée sélectionnée (entre 1 et 30 minutes), puis se réenclenchera. L'opération peut être répétée indéfiniment jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.  
 2) La fonction **SNOOZE** (rappel d'alarme) des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

**Réglage de la durée du rappel d'alarme –**  
 Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est de 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :  
 \* Appuyez sur le bouton **SNOOZE** (rappel d'alarme) (3) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'afficheur du réveil indiquera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.  
 \* Appuyez sur le bouton **« SLOW »** (défilement lent) (10) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).  
 \* Lorsque l'afficheur indique la durée du rappel d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

**Arrêter l'alarme –**  
 L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.  
 1) Lorsque l'alarme s'arrête, appuyez sur le bouton **« ALARM OFF »** (DÉSACTIVATION de l'alarme) (7). L'alarme se désactive automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le paramètre de l'alarme n'est pas modifié.  
 2) Pour arrêter définitivement l'alarme, faites glisser vers le bas le « commutateur du mode Alarme » (8) jusqu'à la position OFF. L'alarme ne sera pas réactivée tant que le « commutateur du mode Alarme » (8) n'aura pas été repositionné sur l'une des positions « VIB », «BUZZ» ou «VIB/BUZZ».  
**REMARQUE :** la fonction de désactivation des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

**Fonctionnement du variateur –**  
 Il existe un réglage de la luminosité à 5 niveaux pour l'affichage DEL. Appuyez une fois sur le bouton de **RAPPEL D'ALARME** pour modifier la luminosité de l'écran. La luminosité suivra le cycle suivant en partant de 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (de claire à sombre, puis de sombre à claire).  
**\*REMARQUE :** la fonction du variateur ne marche pas lorsque le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

**Réglage du volume –**  
 1) Pour régler le volume, faites pivoter la molette de **VOLUME** (4) qui se trouve sur le coin inférieur droit du réveil.  
**Réglage de la tonalité –**  
 1) Pour régler la TONALITE, faites pivoter la molette de **TONALITE** (10) qui se trouve sur le coin supérieur droit du réveil.  
**Vibreur pour lit / vibrateur –**  
 1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur « l'entrée du VIBRATEUR » (15).

2) Pour activer le vibreur, faites glisser le « commutateur du mode Alarme » (8) sur la position « VIB/BUZZ » ou « VIB ».  
 3) Placez le vibreur entre le matelas et le sommier.

**Batterie de secours –**  
 Afin d'utiliser la batterie de secours, vous pouvez installer une pile alcaline de 9-volts au dos du réveil, sous le couvercle du logement de la pile (11). La pile doit être achetée séparément. **Veillez noter que lors d'une panne de courant l'écran DEL n'affiche pas l'heure, mais l'horloge continue de fonctionner et affichera l'heure correcte dès le retour du courant électrique.** Lors d'une coupure de courant, la pile alcaline ne peut faire fonctionner que l'IC du réveil et ceci jusqu'à un maximum de 30 jours. **(Lors d'une coupure électrique l'afficheur DEL ne montre pas l'heure.)**  
**REMARQUE :** pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide susceptibles de l'endommager.

**Alimentation d'entrée CC 9V –**  
 Fixez « L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC » (13) sur l'arrière de DC9V IN à proximité de « L'ENTRÉE DU VIBRATEUR » (15) ; il s'agit de l'entrée la plus petite des deux.  
**REMARQUE :** IMPORTANT : ne confondez pas « L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC » (13) et « L'ENTRÉE DU VIBRATEUR » (15).

**INFORMATIONS GÉNÉRALES –**  
 Adaptateur secteur homologué UL : CA100-240V~ 50/60Hz  
 Consommation électrique : sortie de l'adaptateur : CC9V ~~~ 650mA



Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.

**ATTENTION :**  
 POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.



Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement indiquant des instructions importantes fournies avec le produit.

**AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;
- les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT**  
 Le réveil Sonic Boom SBB500ss est garanti pendant un (1) an, à compter de la date d'acquisition, contre les défauts de fabrication et de matériel. Au cours de cette période Sonic Alert réparera ou remplacera sans aucun frais sur les pièces et la main d'œuvre et à sa seule discrétion le modèle SBB500ss. Contactez notre service clientèle afin d'obtenir un RA (numéro d'autorisation de retour) et des informations sur la manière de procéder pour retourner votre produit. Appelez le No 1-888-864-2446 ou envoyez un courriel à [RMA@sonicalert.info](mailto:RMA@sonicalert.info). Une copie de la quittance d'achat est nécessaire pour l'obtention du numéro d'autorisation.

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée BP20061, 59791 Grande Synthe Cedex

Distribué par: **geemarc SA** FRANCE

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée BP20061, 59791 Grande Synthe Cedex  
 Tel: +33 (0) 328587575 Fax: +33 (0) 328587576  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



**German**



**Sonic Alert**  
 Der führende US-Hersteller von optischen Alarmsystemen  
**Modell SBB500SS-V3**  
**Sonic Boom Wecker mit Bettvibration**



**BEDIENUNGSANLEITUNG**


**WICHTIG –** Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Siehe Bedienungsanleitung auf der Rückseite.  
 –Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts nur den mitgelieferten Adapter.  
**Warnung:** Um die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks zu vermeiden, dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss gewährleistet sein, dass die am Gerät angegebenen Anforderungen der verfügbaren Stromquelle entsprechen, d.h. 100 – 240 V –.

- Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsoffnungen mit Gegenständen wie einer Zeitung, Tüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.
- Auf das Gerät keine Quellen offener Flammen wie z. B. Kerzen stellen.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ausreichende Lüftung stellen.
- Wenn der Netzstecker als Trenngerät verwendet wird, muss das Trenngerät weiterhin betriebsbereit bleiben.

**ALLGEMEINE DATEN**  
 Leistungsaufnahme: Adapter DC 9V 650 mA  
 Für die USA UL-gelisteter Transformator (Underwriters Laboratories)  
 Für Europa zugelassener CE-Transformator

- Testmodus:**
- 1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeitasten 3 Sekunden lang, um den Testmodus aufzurufen. Auf der Anzeige erscheint "ES7" um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Testmodus befindet.
  - 2) Wird innerhalb von einer Minute keine Taste betätigt, endet der Testmodus nach Ablauf einer Minute und die Uhr kehrt in den Uhrzeitmodus zurück.
  - 3) Drücken Sie innerhalb einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitasten, die wirkungslos sind), um den Testmodus sofort zu beenden.
  - 4) Wird während des Testmodus der Funktionsschalter verschoben, werden die verschiedenen Funktionen der Uhr aufgezigt:
    - a) Funktionsschalter auf OFF – dauerhafter "Wiiiii"-Ton, der den Testmodus anzeigt.
    - b) Funktionsschalter auf BUZZ demonstriert den Summertton.
    - c) Funktionsschalter auf VIB demonstriert die Vibration.
    - d) Funktionsschalter auf VIB & BUZZ demonstriert den Summertton und den Vibrator.
  - 5) Klicken Sie nach Beendigung des Testmodus auf eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeitasten, die wirkungslos sind), um den Testmodus sofort zu beenden.

**GEBRAUCHSANLEITUNG**  
**WECKER MIT BETTVIBRATOR**  
**MODELL SBB500SS-V3**

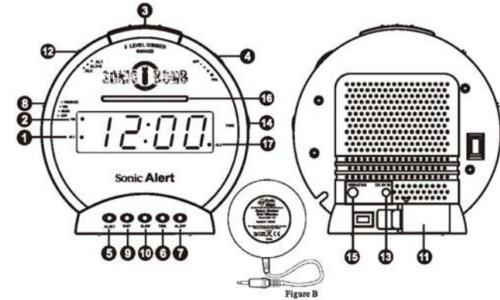

- Auf Abbildung oben dargestellte Funktionen:**
- 1) Weckruf-Indikator 1
  - 2) PM-Indikator
  - 3) Schlummertaste / Einstellen der Schlummerzeit/Dimmer
  - 4) Lautstärkeregler
  - 5) Alarm Set / Einstellen der Alarmdauer
  - 6) Time Set-Taste
  - 7) Weckruf-Off-Taste
  - 8) Weckruf-Funktionsschalter
  - 9) Schnell Min./Studententaste / Wahl Taste 12/24 h
  - 10) Langsam Min./ Studententaste
  - 11) Batteriefach
  - 12) Weckrufwählschalter
  - 13) Netzadapter
  - 14) Wecktonregler
  - 15) Vibrationsausgabe
  - 16) Blinkende Leuchtanzeige
  - 17) Weckruf-Indikator 2

- Einstellen der korrekten Uhrzeit –**  
 1) Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste** (6) und drücken Sie gleichzeitig die **Studententaste** (9), um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen.  
 2) Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste** (6) und drücken Sie gleichzeitig die **Minutentaste** (10), um die Uhrzeitanzeige auf die gewünschte Zeit vorzustellen. Ein Leuchtpunkt oben links in der Uhrzeitanzeige steht für Nachmittag (PM). Wird kein Leuchtpunkt angezeigt, bedeutet das Vormittag (AM).  
**Einstellen der Weckrufzeit –**  
**Weckruf 1 einstellen**  
 1) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL 1-Position. Die Weckrufanzeige "**AL1**" (1) leuchtet auf.  
 2) Die "**ALARM SET /OFF**"-Taste (5) (Weckruf aktivieren / ausschalten) drücken und halten. Gleichzeitig die "**FAST**"-Taste (9) (Schnellentaste) oder die "**SLOW**"-Taste (10) (Langsamtaste) drücken, um die Anzeige bis zur gewünschten Uhrzeit vorzustellen.  
**Weckruf 2 einstellen**  
 4) Nachdem der AL1-Weckruf eingestellt wurde, schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position. Die Weckrufanzeige "**AL2**" (17) leuchtet auf.  
 5) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position. Die Weckrufanzeige "**AL2**" (17) leuchtet auf.  
 6) Die "**ALARM SET /OFF**"-Taste (5) (Weckruf aktivieren / ausschalten) drücken und halten. Gleichzeitig die "**FAST**"-Taste (9) (Schnellentaste) oder die "**SLOW**"-Taste (10) (Langsamtaste) drücken, um die Anzeige bis zur gewünschten Uhrzeit vorzustellen.

- Auswahl des 12 oder 24 Stunden-Formats –**  
 Drücken und halten Sie die **Uhrzeitaste** (6) sechs Sekunden lang, um auf den Formatauswahlmodus zuzugreifen. Geben Sie die **Uhrzeitaste** (9) frei, wenn "12 H" oder "24 H" auf der Anzeige erscheint. Drücken und geben Sie die Uhrzeitaste frei, um zwischen den Formaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen zeitmodus zurück.  
**Weckruf –**  
**Weckrufe aktivieren:**  
 1) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL 1-Position, um Weckruf 1 zu aktivieren. Die Weckrufanzeige "AL1" (1) leuchtet auf.  
 2) Schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position, um Weckruf 2 zu aktivieren. Die Weckrufanzeige "**AL2**" (17) leuchtet auf.

- 3) Sollen beide Weckrufe aktiviert werden, schieben Sie den "**ALARM SELECTOR**" (12) (Weckrufwählschalter) in die AL2-Position. Die Weckrufanzeigen "**AL1**" (1) und "**AL2**" (17) leuchten auf.  
**Auswahl des Aufwachmodus**  
 Zur Auswahl des Aufwachmodus schieben Sie den "Weckrufmodusschalter" (1) in die von Ihnen gewünschte Position:  
 a) "BUZZ" (Summen) für Ton  
 b) "VIB" für Bettschüttler  
 c) "VIB/ BUZZ" für sowohl Ton als auch Bettschüttler

**HINWEIS:** Nachdem ein Aufwachmodus gewählt wurde, gilt er für beide Weckrufe.  
**Weckruffschemata –**  
 Bei aktiviertem Weckruf sind die Schemata des Summers / der Blinklichtanzeige nicht mehr synchron mit dem Vibrator. Dies bedeutet, wenn Summer / Blinklichtanzeige eingeschaltet ist (ON), ist der Vibrator ausgeschaltet (OFF), und wenn Summer/ Blinklichtanzeige ausgeschaltet ist (OFF), ist der Vibrator eingeschaltet (ON).  
**ALARME 1 -** Wenn Weckruf 1 aktiviert ist, gibt er drei Summtöne ab, gefolgt von Vibration. Das Schema wird so oft wiederholt, bis der Weckruf gestoppt wird.  
**ALARME 2 -** Wenn Weckruf 2 aktiviert ist, gibt er vier Summtöne ab, gefolgt von Vibration. Das Schema wird so oft wiederholt, bis der Weckruf gestoppt wird.

- Einstellen der Dauer des Weckrufs –**  
 Die voreingestellte Dauer des Weckrufs beträgt 30 Minuten. können jedoch die Dauer nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 59 Minuten einstellen.  
 Einstellen der Weckruffdauer:  
 1) Drücken und halten Sie die Taste **AL SET** sechs Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckruffdauer mit '30' ein.  
 2) Drücken Sie die Taste "**MIN**" (10) zur Einstellung der gewünschten Weckruffdauer von 1 Minute bis 59 Minuten.  
 3) Wenn in der Anzeige die gewünschte Weckruffdauer erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckruffdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

- Schlummerbetrieb –**  
 Wenn der Wecker morgens aktiviert wird, können Sie die **Schlummertaste** (3) drücken, um den Weckruf vorläufig auszustellen. Der Weckruf bleibt 9 Minuten lang oder über den von Ihnen gewählten Zeitraum von einer bis 30 Minuten deaktiviert, und wird dann wieder aktiviert. Der Schlummerbetrieb kann unbegrenzt oft wiederholt werden, bis der Weckruf endgültig ausgeschaltet wird.  
**Einstellen der Schlummerzeit –**  
 Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 9 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 30 Minuten einstellen. Einstellen der Schlummerzeit:  
 1) Drücken und halten Sie die **Schlummertaste** (3) vier Sekunden lang. Die Uhrenanzeige zeigt die voreingestellte Schlummerzeit '9'.  
 2) Drücken Sie die Taste "**MIN**" (10) zur Einstellung der gewünschten Schlummerzeit von 1 Minute bis 30 Minuten.  
 3) Wenn in der Anzeige die gewünschte Schlummerzeit erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlummerzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

- Abschalten des Weckrufs –**  
 Der Weckruf kann temporär für den Tag oder permanent abgeschaltet werden.  
 1) Wenn der Weckruf ertönt, einfach die Taste "**AL OFF**" (7) drücken. Der Weckruf schaltet sich selbst für den Tag aus und ertönt am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit, sofern die Weckzeit nicht geändert wurde.  
 2) Um den Weckruf permanent abzuschalten, schieben Sie den **Funktionsschalter** (8) in die Aus-Position. Der Weckruf ertönt erst dann wieder, wenn der **Funktionsschalter** (8) auf "VIB", "BUZZ" oder "VIB/BUZZ" gestellt wird.  
 Dimmerbetrieb  
 Sie können die Helligkeit der LED-Anzeige steuern. Drücken Sie ein Mal auf die Schlummertaste, um die Helligkeit der Anzeige zu ändern. Die Helligkeit wechselt zyklisch von hell (5) nach gedämpft (1) und wieder zurück.  
**\*HINWEIS:** Die Dimmerfunktion ist im Schlummermodus deaktiviert.

- Weckruf –**  
 Die gewünschte Weckzeit einstellen und den **VIB/BUZZ/OFF-Schalter** (8) in die gewünschte Position schieben. Für Bettvibrator auf VIB, für Weckruf auf BUZZ oder für beide Funktionen auf VIB/BUZZ schieben.  
**Weckton –**  
 Um den Weckton einzustellen, am **Wecktonregler** (14) rechts am Wecker, unter dem **Lautstärkeregler** (4) drehen, bis das gewünschte Level erreicht ist.

**Lautstärke –**  
 Um die Lautstärke einzustellen, am **Lautstärkeregler** (14) oben rechts am Wecker drehen.  
**Bettvibrator/Vibrator – Abbildung B –**  
**Den Bettvibratoranschluss an der Rückseite des Weckers am Anschluss VIBRATOR-Eingang (15) einstecken.**  
 2) Um den Vibrator zu aktivieren, den **Funktionsschalter** (8) auf VIB oder VIB/BUZZ schieben.  
 3) Den Vibrator unter die Matratze oder das Kissen legen.

**Batterie-Backup –**  
 Um die Backup-Batterie zu verwenden, eine 9-Volt-Alkalibatterie an der Rückseite des Weckers unter der **Batteriefachabdeckung** (11) einlegen. Batterie im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte beachten Sie, dass auf der LED Anzeige zwar während eines Stromausfalls nichts angezeigt wird, die Uhr jedoch korrekt weiterläuft, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Bei Stromausfall reichen die Alkalibatterien nur für eine Betriebsdauer von bis zu 30 Tagen. (Bei Stromausfall zeigt die LED-Anzeige nicht die Uhrzeit an.)  
**HINWEIS:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, dass die Batterie alle sechs bis acht Monate ausgewechselt wird. Wenn der Wecker längere Zeit nicht verwendet wird, sollte die Batterie heraus genommen werden, damit sie nicht auslaufen kann.

**DC 9V -Eingang –**  
 Den Netzanschlusstecker an der Seite des Weckers am Anschluss **DC9V IN** (13) neben dem **VIBRATOR-Eingang** (15) anschließen; dies ist der kleinere der beiden.  
**Wichtig:** Netzeingang nicht mit Vibrator-Ausgang verwechseln.



Der Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, dass Sie auf lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren hinweist



Das Ausfunktionszeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Anweisungen hinweist, die dem Produkt beiliegen.

**WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.**

- Die Batterie auf umweltverträgliche Weise entsorgen.
- bezeichnet separate Sammlung für elektrische und elektronische Geräte

Eine normale Funktion kann durch eine starke elektromagnetische Signalleberlagerungen (von anderen Geräten) beeinflusst werden. Falls das eintritt versuchen Sie bitte das Gerät an einen anderen Platz zu stellen. Dann sollte es wieder normal funktionieren. Es könnte jedoch möglich sein, dass Sie das Gerät wieder neu einstellen müssen. Folgen Sie dafür bitte den Anweisungen in der Anleitung.

**1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT**  
 Für den Sonic Boom Wecker Modell SBB500ss gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Innerhalb dieses Garantiezeitraums repariert oder ersetzt Sonic Alert auf Ihren Wunsch den SBB500ss, ohne Kosten für Teile und Arbeit in Rechnung zu stellen. Senden Sie den SBB500ss (unter Übernahme der Frachtkosten) und eine Kopie Ihres Kaufbelegs einfach an:

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée BP20061, 59791 Grande Synthe Cedex

Distribué par: **geemarc SA** FRANCE

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée BP20061, 59791 Grande Synthe Cedex  
 Tel: +33 (0) 328587575 Fax: +33 (0) 328587576  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

